

Wechsel VaVe-Kopf



Wichtig:

Bevor Sie den Wechsel des VaVe-Kopf vornehmen, stellen Sie sicher, dass

- **das Gerät vom Strom getrennt ist,**
- **der Druck vom Gerät mittels Druckablassventil auf der Rückseite der Verdampfeinheit abgelassen und**
- **sich kein Isofluran mehr im Verdampfer befindet!**

1. Drehen Sie den VaVe-Kopf leicht, damit Sie problemlos an alle 4 Innen-Sechskant-Schrauben herankommen.
2. Entfernen Sie die 4 Innen-Sechskant-Schrauben auf der Vorderseite der VaVe-Einheit.
3. Ziehen Sie mit leichter Kraft den VaVe-Kopf aus seinem Sitz.
4. Entnehmen Sie die Drehscheibe und die alte Dichtung aus dem Sitz.
5. Prüfen Sie, dass keine Verschmutzungen im Sitz der VaVe-Einheit vorhanden sind.
6. Nehmen Sie die neue Dichtung vorsichtig vom neu gelieferten VaVe-Kopf ab und setzen Sie diese in den Dichtringsitz ein. Beachten Sie dabei, dass sie keine Beschädigungen an der neuen Dichtung vornehmen.
7. Setzen Sie die Drehscheibe wieder ein, sodass die ausgefräste Seite zu Ihnen nach außen zeigt.
8. Setzen Sie den VaVe-Kopf gerade auf den Sitz und drücken diesen mit leichtem Druck in seinen Sitz.
9. Setzen Sie die 4 Innen-Sechskant-Schrauben in die Löcher und ziehen Sie diese gleichmäßig an, sodass der VaVe-Kopf nicht verkantet.
10. Legen Sie das Altteil zurück in den Karton und senden Sie dieses mittels des Retourenscheins an uns zurück.



Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne unter
der Nummer **+41 32 681 6080** oder per Mail unter **service@promatec.ch**
zur Verfügung.